

PMW HIPS SWAB

1. 제조원

피엠더블유 주식회사

- 본사 : 부산광역시 해운대구 센텀중앙로48, 904호 (우동, 에이스하이테크21)

- 제조소 : 울산광역시 울주군 청량읍 처용산업 3길 135, 경공업 1동 2층 A호

2. 신고번호 : 제신 22-108호

3. 제품명 : PMW Flocked H Swab

4. 모델명 : PMW-NP H1, PMW-OP H1, PMW-DUAL H1, PMW-NP H2, PMW-OP H2, PMW-DUAL H2

5. 제품구성

모델명	구성
PMW-NP H1	비강용 1EA
PMW-NP H2	비강용 1EA
PMW-OP H1	구강용 1EA
PMW-OP H2	구강용 1EA
PMW-DUAL H1	PMW-NP H1 1EA + PMW-OP H1 1EA
PMW-DUAL H2	PMW-NP H2 1EA + PMW-OP H2 1EA

6. 사용 목적

질병 검사 등을 위하여 짧은 시간 안에 구강, 비강, 이강 또는 항문에서 체액, 분비물 등의 채취를 목적으로 사용한다.

7. 사용방법

① 사용 전 준비사항

- 사용 전 제품 포장의 이상 여부와 제품의 손상, 파손을 확인한다.

② 사용방법

1) 제품을 개봉한다.

2) 제품을 포장지로부터 조심스럽게 꺼낸다.

3) 환자로부터 검체를 채취한다.

4) 별도의 보관 또는 운반 용기에 제품의 헤드부를 넣고, Break Point 부분에 힘을 가한다.

(보관 또는 운반 용기가 클 경우 제품의 전체를 넣는다.)

③ 사용 후 보관 및 관리방법

1) 본 제품은 일회용이므로 사용 후 반드시 폐기한다.

2) 재사용 금지

8. 사용 시 주의사항

① 경고

1) 본 제품은 일회용 제품으로 재사용을 금지한다.

2) 본 제품은 포장이 파손되었을 경우 사용하지 않는다.

3) 본 제품을 수직으로 구부려 사용하지 않는다.

② 사용 시 주의사항

1) 사용하기 전에 제품의 손상이 없는지 확인한다.

2) 검체 채취 시 많은 힘을 가하거나 강하게 누르는 등의 과도한 힘이 가해지지 않도록 주의하여 사용한다.

3) 직사광선을 피하고 실온 보관한다.

4) 검체 채취 시 수직으로 구부려 사용할 경우 브레이크 포인트가 부러질 수 있으므로 주의하여 사용한다.